

Fluiorespira

Solução fisiológica
estétil em ampolas

INDICAÇÕES:

A solução fisiológica estétil, está recomendada para a limpeza diária das fossas nasais e lavagem ocular dos bebés, crianças e adultos. Pode ser utilizada em aerosolterapia.

USO NASAL:

A solução fisiológica facilita a dissolução do muco que geralmente obstrui as cavidades nasais, ajudando a eliminar as secreções. Graças à hidratação que proporciona e à sua acção mecânica, a solução alivia rapidamente a secreção nasal.

USO OFTÁLMICO:

A solução fisiológica pode ser utilizada na higiene ocular através de gotas, lavagem ou aplicação do produto numa gaze estétil. Também pode ser utilizada como lágrima artificial em situações de secreção ocular.

USO EM AEROSSOL

A solução fisiológica pode ser utilizada em aerosolterapia para a fluidificação das secreções ou para a diluição de medicamentos.

FORMA E APRESENTAÇÃO:

Cada embalagem contém 30 ampolas monodose, de utilização única, com capacidade de 5 ml e um adaptador nasal reutilizável.

COMPOSIÇÃO POR 100 ML:

Cloreto de sódio: 0,9 g; Água purificada qbp 100 ml.
Cada ampola contém 5 ml.

OBSERVAÇÕES

A solução fisiológica pode ser utilizada tantas vezes quantas as necessárias e durante períodos de tempo prolongados.

Caso esteja a fazer um tratamento com um medicamento de aplicação nasal ou oftálmica, a lavagem das fossas nasais e dos olhos com a solução fisiológica deve ser realizada antes, e não depois, da administração do medicamento.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- Ampolas de utilização única. Uma vez utilizada a ampola, a quantidade que possa sobrar deixa de ser estétil, pelo que não é recomendado o seu uso oftálmico
- Não injectar
- Manter o dispositivo os seus componentes fora do alcance e da vista das crianças.
- Não usar após ter expirado o prazo de validade.
- Conservar à temperatura ambiente.
- Para evitar possíveis contaminações do conteúdo, as ampolas monodose devem ser utilizadas imediatamente após a sua abertura.
- Recomenda-se precaução na administração do produto em aerosol nos indivíduos com história de dispneia (falta de ar) após a inalação de soluções fisiológicas salinas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Abriu a ampola monodose girando a sua parte superior até esta se destacar do frasco.

USO NASAL: inclinar ligeiramente a cabeça para trás. Introduzir a ponta da ampola no orifício nasal e pressionar suavemente. De seguida, limpar suavemente o exterior do nariz com um lenço ou toalha.

O adaptador para uso exclusivo nasal, incluído na embalagem, pode ser útil para ajudar à administração da solução fisiológica FLUIRESPIRA, especialmente a bebés ou crianças.

Uma vez aberta a ampola, inseri-la no adaptador e introduzir suavemente no orifício nasal do bebé ou criança.

Depois de utilizado, o adaptador deve ser lavado com água da torneira e/ou com um detergente neutro. Recomenda-se a esterilização ou fervura em água durante 20 minutos, ou no esterilizador de biberões utilizando o ciclo normal de esterilização. Não mergulhar o adaptador em soluções químicas desinfectantes uma vez que o podem danificar.

USO OFTÁLMICO: molhar abundantemente uma gaze e limpar suavemente as pálpebras do bebé ou verter algumas gotas no olho e limpar com a ajuda de uma gaze estétil. Em adultos, o produto pode ser utilizado em gotas ou para lavagem.

USO EM AEROSSOL: a solução fisiológica pode ser nebulizada em aparelhos de aerosol, seguindo as instruções de uso do mesmo e as recomendações para a sua administração.

Ed. 24.01.2011

STERILE A Não injectar



0546

Fabricado por:

Zambon S.p.A.
Via Lillo del Duca, 10
20091 - Bresso (MI)
Italia

Distribuído em Portugal por:

Zambon Produtos Farmacêuticos, Lda.
Rua Comandante Enrique Maya, 1
1500-192 Lisboa
info@zambon.pt

65NOT4820/C

Zambon